



Absender:

.....
.....
.....
.....

Ruhr-Universität Bochum
Humangenetik; MA 5
Prof. Dr. J.T. Epplen
Dr. Gabriele Dekomien
Universitätsstraße 150

D-44801 Bochum

Entnehmen und Einsenden von Mundschleimhautabstrichen

1. Beschriften Sie die Verpackung mit dem Namen der Person von der die Probe stammt. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Angaben identisch sind mit denen auf diesem Formular.
2. Nehmen Sie das Wattestäbchen mit sauberen Händen aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass Sie es nur am Ende festhalten. Berühren Sie NIE den Wattebausch.
3. Streichen Sie mit dem Wattestäbchen auf der Innenseite der Wange entlang. Während Sie auf und ab fahren, drehen Sie das Wattestäbchen etwas. Machen Sie das für etwa 10 Sekunden. Wiederholen Sie das mit demselben Wattestäbchen auf der Innenseite der anderen Wange.
4. Schieben Sie das Wattestäbchen nach der Probenahme sofort wieder in die sterile Verpackung.
5. Verschließen Sie die Verpackung und schicken Sie die Proben mit diesem Formular an die Humangenetik Bochum zurück.

Name des Hundes:	_____
Rasse:	_____
Geb. am:	_____ ZB/ChipNr.: _____
Geschlecht:	Diagnose PRA: <input type="checkbox"/> gesund <input type="checkbox"/> krank
	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Probenentnahme am:	_____
Name und Anschrift des Besitzers:	_____
(nur falls anders als Absender)	_____
